


# Flowflex™

## SARS-CoV-2

### Antigen Schnelltest



Ein schneller und äußerst zuverlässiger Test zur frühen Diagnose von COVID-19.

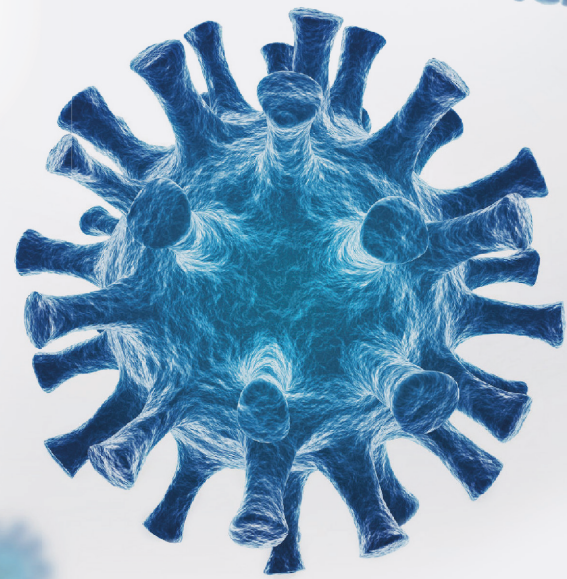

Vertrieb in Österreich durch DIALAB GmbH! Ihr zuverlässiger Partner für in-vitro-Diagnostik



Schnell



Zuverlässig



Einfach in der Anwendung



Anwenderfreundlich



CE Markierung

ACON®

# Flowflex SARS-CoV-2 Antigen Schnelltest

Der Flowflex SARS-CoV-2 Antigen Schnelltest ist ein immunchromatographischer in-vitro-Test für den qualitativen Nachweis von SARS-CoV-2 Nukleokapsid-Protein-Antigen aus vorderen (anterioren) Nasenabstrichproben. Der Test ist für die professionelle Anwendung zugelassen und ermöglicht die frühe Diagnose von SARS-CoV-2 Infektionen.

- **Nachweis: SARS-CoV-2 Nukleokapsid-Protein-Antigen**
- **Genauigkeit: 98,8%**
- **Sensitivität: 97,1%**
- **Spezifität: 99,5%**
- **Probenentnahme: vordere (anteriore) Nasenabstriche**
- **Testzeit: Ergebnisse in 15 Minuten**
- **Haltbarkeit: 24 Monate**
- **Lagertemperatur: 2-30°C**


## Testdurchführung und Ergebnisinterpretation

### 1. Vorbereitung

A. Öffnen Sie den Testkit:



B. Enthalten ist:

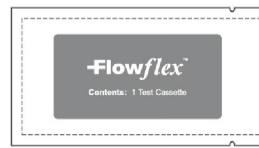

Testkassette



Einwegtupfer



Extraktionspufferröhrchen



Gebrauchsanweisung

### 2. Probennahme

1



Führen Sie den Tupfer mit einer leichten Drehbewegung bis zu 2,5 cm in das Nasenloch ein.

2




Drehen Sie den Tupfer 5 Mal an der Schleimhaut im Nasenloch.

3




Wiederholen Sie diesen Vorgang mit demselben Tupfer im anderen Nasenloch.

4

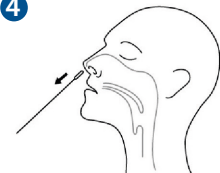


Ziehen Sie den Tupfer aus dem Nasenloch. Die Probe kann nun weiterverarbeitet werden.

### 3. Probenvorbereitung

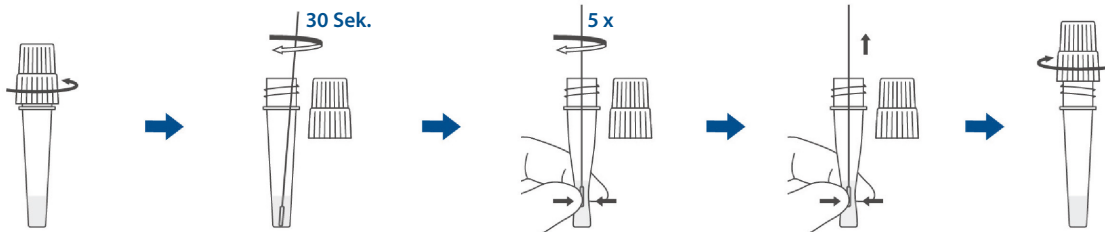

### 4. Testausführung

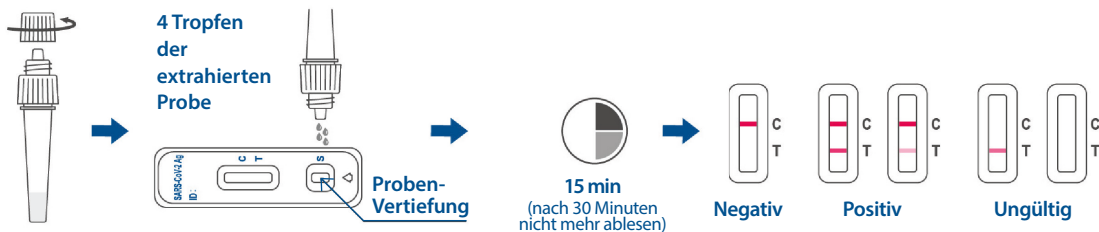

## Bestellinformationen

Produktname	Katalog Nr.	Format	Probe	Packungsgröße	CE-markiert
Flowflex SARS-CoV-2 Antigen Schnelltest	L031-11845	Kassette	Anteriore Nasenabstriche	1 Test/Kit	ja